

3-Point Products,® Inc.



Mode d'emploi - Français (FR)



www.3pp-eifu.com



Description : Une sangle d'union 3pp® Buddy Loop® soutient et protège les doigts blessés.

Utilisation prévue : Un dispositif flexible conçu pour fixer un doigt blessé à un autre doigt adjacent pour le protéger, pour maintenir les doigts alignés correctement, pour faciliter les mouvements et contribuer au processus de guérison.



Précautions : Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes. Le dispositif peut provoquer l'irritation de la peau. Interrompre l'utilisation en cas d'irritation. Contactez votre fournisseur de soins de santé si l'irritation persiste. Respectez les consignes de nettoyage et appliquez une sangle propre régulièrement. Discutez au fournisseur de soins de santé avant l'utilisation si vous souffrez de diabète ou d'une réduction de la circulation sanguine.

Instructions : Comment appliquer

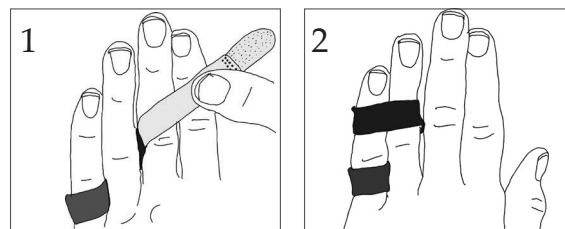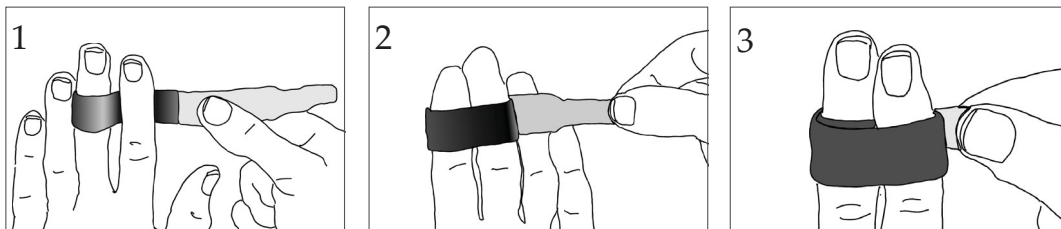

Contenu : Le produit est fabriqué en nylon, Lycra® et mousse. Les matériaux ne contiennent pas de latex. Il est disponible en trois tailles, emballé en différentes quantités. Ne pas utiliser un dispositif endommagé. Entreposer dans un endroit frais et sec.

Nettoyage : Lavez à la main et laissez le produit sécher à l'air régulièrement. Appliquez un produit propre selon les besoins et en conformité avec les conditions.

Élimination : Le produit a été conçu pour être réutilisable par la même personne. Jetez le dispositif s'il présente des signes d'usure excessive et remplacez-le avec un produit neuf, le cas échéant.

Quand devriez-vous consulter un professionnel de la santé ? Consultez un professionnel de la santé en cas de réactions indésirables au dispositif, y compris une réaction de la peau ou des changements de l'état.


Avis à l'utilisateur et/ou au patient : En cas d'incident indésirable lié au dispositif, enlevez le dispositif et rapportez l'incident au distributeur et au Représentant Autorisé de l'État Membre où réside l'utilisateur.

Distributeurs : www.3pp-eifu.com/#distributors

Symboles sur l'étiquette : Tous les symboles figurant sur l'étiquette du produit ou dans la documentation associée au produit sont définis dans la Légende des Symboles 3-Point Products à l'adresse : www.3pp-eifu.com/#symbols



3-Point Products, Inc.

118 Log Canoe Circle
Stevensville, MD 21666 USA
www.3pointproducts.com
+001.410.604.6393 



Sallmann Medical GmbH

Alois-Stockinger-Str.16
5020 Salzburg Austria
service@sallmann-medical.eu



Swiss AR Services
GmbH

Industriestrasse 47
CH-6300 Zug