

3-Point Products,[®] Inc.



Gebrauchsanweisung – Deutsch (DE)



www.3pp-ifu.com



Beschreibung: Der Zehenverband 3pp[®] Toe Loop[®] erhält aufrecht und schützt verletzte Zehen.

Verwendungszweck: Ein flexibler Zehenverband sichert einen verletzten Zeh an einem benachbarten Zeh zusammen, erhält die Zehen in der richtigen Ausrichtung aufrecht, erleichtert die Bewegung und fördert die Heilung.



Vorsichtsmaßnahmen: Bei offenen Wunden nicht verwenden. Der Zehenverband kann Hautreizungen verursachen. Verwendung einstellen, wenn eine Reizung auftritt. Sich an Ihren Hausarzt wenden, wenn die Reizung anhält. Die Reinigungsrichtlinien befolgen und regelmäßig einen sauberen Wickel anlegen. Vor der Verwendung mit Ihrem Hausarzt konsultieren, wenn Sie an Diabetes oder Kreislaufschwäche leiden.

Gebrauchsanweisung: Wie man den Zehenverband anlegt

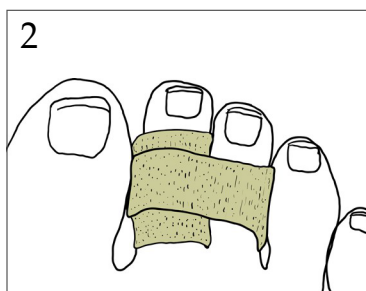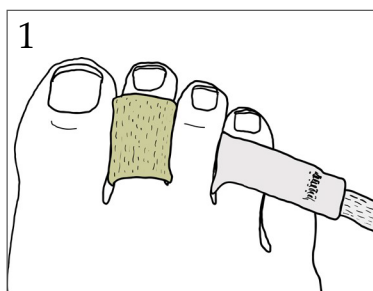

Schmal 7/8" x 2 3/8" (2,2 cm x 6,0 cm)



Breit 1 1/4" x 4 1/4" (3,1cm x 10,8 cm)

Wie es geliefert wird: Das Produkt wird aus Nylon, Lycra® und Schaumstoff hergestellt. Die Materialien sind latexfrei. Es ist in drei Größen erhältlich, verpackt in verschiedenen Mengen. Nicht verwenden, wenn der Zehenverband beschädigt ist. An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Reinigung: Den Zehenverband regelmäßig handwaschen und außen trocknen lassen. Je nach Bedarf einen sauberen Zehenverband und je nach den Bedingungen anbringen.

Entsorgung: Der Zehenverband ist dafür vorgesehen, mehrmals an derselben Person verwendet zu werden. Den Zehenverband entsorgen, wenn der übermäßige Verschleißzeichen aufweist, und den bei Bedarf durch ein neues Produkt ersetzen.


Wann muss man sich an Ihren Hausarzt wenden? Sich an Ihren Hausarzt wenden, wenn es unerwünschte Reaktion auf den Zehenverband feststellt wird, einschließlich Hautreaktionen oder Veränderungen des Zustands.

Hinweis für Anwender und/oder Patienten: Im Falle einer unerwünschten Auswirkung aufgrund der Verwendung des Zehenverbandes, den Zehenverband abnehmen und den Vorfall dem Händler und dem Bevollmächtigten des Mitgliedstaates melden, in dem der Anwender wohnt.

Vertreiber: www.3pp-eifu.com/#distributors

Kennzeichnungssymbole: Alle Symbole, die auf dem Produktetikett oder in der Produktliteratur verwendet werden, sind in der 3-Point Products Symbols Legend hier definiert: www.3pp-eifu.com/#symbols



3-Point Products, Inc.
118 Log Canoe Circle
Stevensville, MD 21666 USA
www.3pointproducts.com
+001.410.604.6393 



Sallmann Medical GmbH
Alois-Stockinger-Str.16
5020 Salzburg Austria
service@sallmann-medical.eu



Swiss AR Services GmbH
Industriestrasse 47
CH-6300 Zug