

3-Point Products,® Inc.



Instrucciones de uso - Español (ES)



www.3pp-eifu.com



Descripción: Una Banda de Inmovilización para los Dedos del Pie® 3pp® que sujeta y protege los dedos lesionados.

Uso previsto: Una banda flexible diseñada para inmovilizar un dedo lesionado al adyacente y así protegerlo, mantener todos los dedos correctamente alineados, facilitar el movimiento y ayudar en la recuperación.



Precauciones: No usar en heridas abiertas. La banda puede causar irritación en la piel. Suspender su uso en caso de irritación en la piel. Consultar a un médico si la irritación persiste. Siga las instrucciones de limpieza y utilice una banda limpia con regularidad. Si sufre diabetes o problemas de circulación, es recomendable consultar al médico antes de utilizar este producto.

Instrucciones: Cómo usar el producto

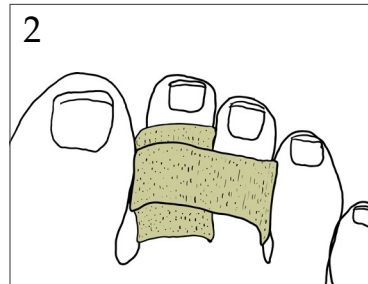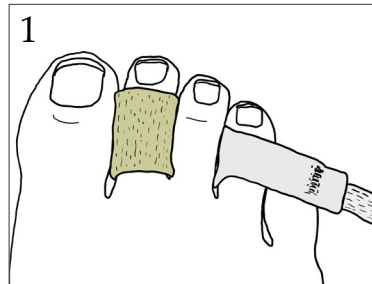

Estrecho 7/8" x 2 3/8" (2,2 cm x 6,0 cm)



Ancho 1 1/4 " x 4 1/4" (3,1 cm x 10,8 cm)



Cómo se distribuye: El producto está hecho con nailon, Lycra® y espuma. Los materiales no contienen látex. Está disponible en tres tamaños y diferentes packs. No usar el producto si está dañado. Conservar en un lugar fresco y seco.

Limpieza: Lavar a mano y secar el producto al aire libre con regularidad. Aplicar un producto de limpieza si es necesario de acuerdo con las condiciones.

Desechado: El producto está indicado para ser reutilizado por la misma persona varias veces. Deseche el producto si muestra signos de desgaste excesivo y reemplácelo por uno nuevo si es necesario.


Cuándo consultar al médico: Si experimenta alguna reacción adversa al usar el producto, incluidas reacciones cutáneas o cambios en la condición de la piel, consulte al médico.

Aviso al usuario y/o paciente: En caso de cualquier incidente adverso relacionado con el producto, se debe suspender su uso y comunicar el incidente al fabricante y a la autoridad competente del Estado Miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.

Fabricante: www.3pp-eifu.com/#distributors

Símbolos de la etiqueta: Todos los símbolos utilizados en la etiqueta o documentación del producto están detallados en la Leyenda de Símbolos de 3-Point Products: www.3pp-eifu.com/#symbols



3-Point Products, Inc.
118 Log Canoe Circle
Stevensville, MD 21666 USA
www.3pointproducts.com
+001.410.604.6393 



Sallmann Medical GmbH
Alois-Stockinger-Str.16
5020 Salzburg Austria
service@sallmann-medical.eu



Swiss AR Services GmbH
Industriestrasse 47
CH-6300 Zug