

3-Point Products,® Inc.



Instruções de Utilização - Português (PT)



www.3pp-eifu.com



Descrição: Uma banda de imobilização 3pp® Buddy Loop® apoia e protege os dedos lesionados.

Utilização prevista: Um dispositivo flexível concebido para amparar um dedo lesionado a um dedo adjacente para proteção, a fim de manter os dedos no alinhamento correto, facilitar o movimento e ajudar no processo de cura.



Cuidados a ter: Não utilizar em feridas abertas. O dispositivo pode causar irritação cutânea. Interromper a utilização caso se verifique irritação. Contactar o seu médico se a irritação persistir. Seguir as instruções de limpeza e aplicar um envoltório limpo regularmente. Trocar impressões com o médico antes de utilizar, caso tenha diabetes ou circulação reduzida.

Instruções: Como aplicar

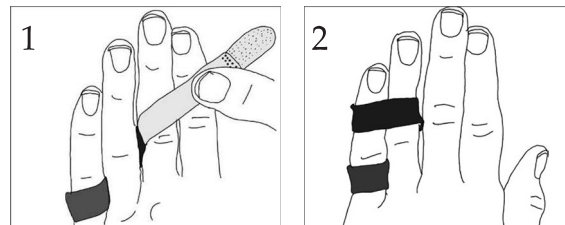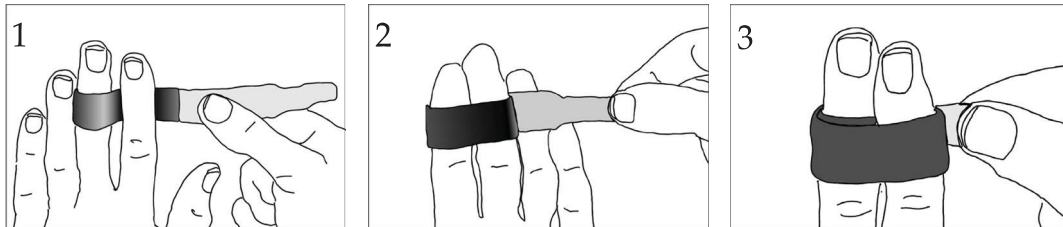

Como é fornecido: O produto é fabricado em nylon, Lycra® e espuma. Os materiais não contêm látex. Encontra-se disponível em três tamanhos, embalado em diversas quantidades. Não utilizar caso o dispositivo esteja danificado. Guardar num local fresco e seco.

Limpeza: Lavar o produto à mão e secá-lo ao ar, regularmente. Aplicar um produto limpo quando necessário de acordo com as condições.

Eliminação: O produto destina-se a reutilização, pela mesma pessoa, várias vezes. Eliminar o dispositivo se este mostrar sinais de desgaste excessivo e substituí-lo por um novo produto, quando necessário.


Quando consultar um médico: Consultar um médico caso sinta alguma reação adversa ao dispositivo, incluindo reação cutânea ou alterações na doença.

Informação ao utilizador e/ou doente: No caso de um evento adverso associado ao dispositivo, remover o dispositivo e comunicar o incidente ao distribuidor e ao representante autorizado no estado-membro onde o utilizador reside.

Distribuidores: www.3pp-eifu.com/#distributors

Símbolos do rótulo: Todos os símbolos utilizados no rótulo ou no folheto do produto encontram-se definidos na menção aos símbolos da ©3-Point Products: "www.3pp-eifu.com/#symbols



3-Point Products,® Inc.
118 Log Canoe Circle
Stevensville, MD 21666 EUA
www.3pointproducts.com
+001.410.604.6393 



Sallmann Medical GmbH
Alois-Stockinger-Str.16
5020 Salzburg Áustria
service@sallmann-medical.eu



Swiss AR Services GmbH
Industriestrasse 47
CH-6300 Zurique